


# OFTALMOSKOP INSTRUKCJA OBSŁUGI

rok zał. 1049

**TECH - MED**®

**TM-OFT100**

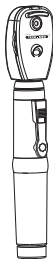

Przez rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

## **Uwaga:**

- Należy chronić oftalmoskop przed wodą, wilgocią, wstrząsem, upuszczeniem i ogniem.
- Nie należy dotykać soczewki bezpośrednio dłońmi ani twardymi przedmiotami.
- Należy używać specjalnej żarówki opisanej w instrukcji
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy wyjąć z niego baterie.

## **OGÓLNE INFORMACJE**

### **Przeznaczenie**

Oftalmoskop TM-OFT100 jest klasycznym urządzeniem medycznym używanym w okulistyce.

Urządzenie wykorzystuje profesjonalny system soczewek, dzięki któremu lekarz może z łatwością ocenić stan oczu pacjenta.

### **Dane techniczne**

- Udoskonalona technologia LED


- 5 różnych szczelin świetlnych





- Zakres soczewek - 20 D do + 20 D

+	1	2	3	4	6	8	10	15	20
-	1	2	3	4	6	8	10	15	20

## OBSŁUGA URZĄDZENIA

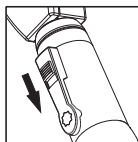

- Włącz urządzenie przesuając włącznik w dół.

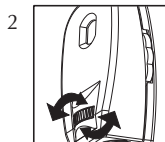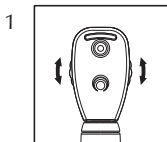

- Dokonaj wyboru zdolności zbierającej soczewki w zakresie od -20 do +20 dioptrii trzymając pokrętkę regulacji z dwóch stron i przekręcając - rys. 1.
- Dokonaj wyboru szczeliny świetlnej za pomocą pokrętki – rys. 2.


## KONSERWACJA

### Wymiana części zapasowych

#### 1. Wymiana żarówki

Odkręć górną część głowicy.

Wymień zużytą żarówkę ciągnąc w dół i wymień ją na nową.

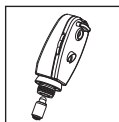

**Uwaga:** Należy używać specjalnej żarówki przeznaczonej dla tego urządzenia. W momencie, gdy żarówka przepali się, jej temperatura jest nadal wysoka, dlatego należy odczekać 5 minut, aby uniknąć oparzenia.

## 2. Wymiana baterii

A. Odkręć dolną pokrywę rękojeści;

B. Wyjmij zużyte baterie i wymień na nowe baterie AA. Biegun dodatni „+” baterii powinien być zwrócony w stronę górnej części urządzenia;

**Uwaga:** Baterie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nie razem z odpadami domowymi.

## Bezpieczne korzystanie z baterii

- Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych;
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

## UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJA

- Zewnętrzną powierzchnię urządzenia oraz wizjer należy czyścić wilgotną szmatką. Nie wolno używać żrących i polerujących środków.

**Uwaga:** Należy zapobiegać przedostaniu się wody do wnętrza urządzenia.

## DANE TECHNICZNE

Żarówka	LED model V-BP101; V-BP102	
Baterie	2 baterie alkaliczne AA; 1.5V	
Warunki eksploatacyjne	Temperatura	10°C ~ 35°C
	Wilgotność	30% ~ 75%
	Ciśnienie powietrza	700hPa-1060hPa
Przechowywanie	Temperatura	-20°C ~ 70°C
	Wilgotność	10% ~ 90%
	Ciśnienie powietrza	500hPa – 1060hPa
Normy	Klasa I MDD 93/42/EEC; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2	